

Zilveren orthesen



Zilveren orthesen

Als u (chronische) klachten heeft aan uw pols, vingers of hand, kunnen uw klachten verminderd of verholpen worden door het dragen van op maat gemaakte zilveren orthesen. Deze orthesen, ook wel zilver splints genoemd, zijn kleine spalkjes, die veel weg hebben van een mooi sieraad. Dit kan het voor u makkelijker maken om de orthese te accepteren en te dragen. De zilveren orthesen worden op voorschrift van een arts aangemeten en besteld door onze instrumentmakers of gemaakt door onze zilversmid.



Wanneer zilveren orthesen?

Zilveren orthesen worden voorgeschreven als u last heeft van pols-, hand- of vingerklachten. Bijvoorbeeld bij een chronische aandoening zoals reuma, het Ehler Danlos Syndroom, M.S., spierdystrofie of RSI. De orthesen kunnen ook worden voorgeschreven als u, door een ongeval, blijvend letsel aan uw hand of vingers heeft opgelopen.



Waarom zilveren orthesen?

De zilveren orthese(n) kunnen gewrichten corrigeren, bewegingen onmogelijk maken of ondersteunen. Veel voorkomende toepassingen van de orthesen zijn het corrigeren van de stand van de vingers bij reuma, het bij elkaar houden van de vingers of het stabiliseren van de pols of duim. Tijdens uw eerste afspraak bepaalt u samen met de instrumentmaker de gewenste functie en vorm van de orthese(n) en krijgt u uitleg over de werking van het hulpmiddel.

Gebruik

Zilver veroorzaakt geen transpiratie of irritatie en is duurzaam en mooi. Het materiaal leent zich prima voor goede en blijvende pasvormen. Dankzij de slanke modellering blijven de vingers bovendien zoveel mogelijk vrij. U kunt dus goed blijven voelen. De zilveren orthese(n) zijn niet zwaar en gaan jaren mee.

Aan- en uittrekken

Het aan- en uittrekken van uw orthese(n) gaat makkelijker als u uw handen, vingers en/of duimen vooraf insmeert met een niet vette lotion. Als u een swanneck heeft, kunt u uw vinger het beste eerst buigen, voordat u de orthese aan-/uittrekt.

Opbouwschema

Begin met de orthese 's ochtends één uur te dragen en 's middags één uur. Gaat dit goed? Dan kunt u de draagtijd elke keer met een uur verlengen, zowel 's ochtends als 's avonds. U kunt dit opbouwen naar vier uur in de ochtend en vier uur in de middag. Daarna kunt u de orthese(n) de gehele dag gaan dragen. Als het niet echt noodzakelijk is, kunt u de orthese beter 's nachts af laten. Dit geeft de huid rust en voorkomt irritaties.

Drukplekken

Let op eventuele drukplekken en of deze vanzelf binnen 20 minuten wegtrekken. Is dit niet het geval of heeft u pijn of andere klachten? Neemt u dan contact met ons op.

Lees verder op de achterzijde.



Meer informatie

De Hoogstraat Orthopedietechniek
Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
030 258 1811
oth@dehoogstraat.nl
www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl





Onderhoud

Maak de orthese(n) regelmatig schoon met een sopje en een 'oude' tandenborstel. Let er goed op dat er geen zeepresten op de orthese achterblijven, dit kan huidirritaties veroorzaken. U kunt de ringen ook onderhouden met zilverpoets.

Diefstal of verlies

Let op dat u uw voorziening niet verliest. De omvang van uw vinger(s) kan/kunnen namelijk in de loop van de tijd veranderen. Bij verlies of diefstal wordt uw voorziening niet vergoed door uw zorgverzekeraar en/of Rijndam Orthopedietechniek. Mogelijk dekt uw inboedelverzekering wel het verlies of diefstal.

Afspraken

Heeft u een afspraak en bent u onverwachts verhinderd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om uw afspraak tijdig telefonisch af te zeggen. Wij kunnen deze tijd dan gebruiken voor andere klanten. Bij het afbellen, kunt u direct een andere afspraak laten inplannen.

